

# quick test

## Klimakterietest

### Självtest som upptäcker förhöjda FSH-nivåer

Quicktest Klimakterietest är ett självtest som upptäcker förhöjda FSH-nivåer. Testet mäter mängden Follicle Stimulating Hormone (FSH) i kvinnans urin. Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett hormon som ökar under klimakteriet. Quicktest klimakterietest kan upptäcka närvaron av FSH i urin så snart koncentrationen når upp till 25 mIU / mL och över.



Förpackningen innehåller:

- Klimakterietest
- Urinkopp
- Manual på svenska
- Torkmedel (används ej)

#### Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, det är endast för externt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande.

Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.  
Förvaras torrt och skyddas mot solljus.

Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat på ytterförpackning samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Quicktest Klimakterietest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Använd inte urin från en gravid eller hormonbehandlad kvinna. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

#### Läs instruktioner innan testet utförs!

Fabriqué par :  
VEDALAB  
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau  
Cerise - B.P. 181  
61006 ALENCON Cedex - FRANCE



Informations médicales et pharmaceutiques au 02.33.27.56.25

Read the instructions before use	For in vitro diagnostic use	Do not reuse
Store between +4°C and +30°C	Batch number	Expiry date
Manufacturer		

MD- 030090 m4 c  
Révision 04/2017

# quick test

### Gör så här:

1. Samla urin i medföljande urinbehållare.
2. Riva upp skyddspåsen och ta ut testremsan från påsen.
3. Håll testremsan vertikalt ner i behållaren med urin under 5 till 10 sekunder. Se bild till höger.
4. Placera testremsan plant.
5. Avläs resultatet efter **5 min.**  
(Tolka inte resultatet efter 10 min.)



Avläs resultatet:

För att tolka resultaten ska du jämföra färgen av FSH-linjen med kontroll-linjens färg.

#### 1. Positivt resultat



Resultatet är positivt om FSH-linjen är mörkare än kontroll-linjen. Detta resultat innebär att FSH-nivån är lika med eller högre än 25 mIU / ml. I detta fall bör ett nytt test utföras 5 eller 7 dagar senare, eftersom koncentrationen av FSH kan förändras under menstruationscykeln. Om det positiva resultatet kvarstår kan du vara under klimakteriet och du rekommenderas att konsultera din gynekolog för en definitiv diagnos.


#### 2. Negativt resultat



Resultatet är negativt om kontroll-linjen är mörkare än FSH-linjen. Detta resultat innebär att koncentrationen av FSH är lägre än 25 mIU / ml och att du förmodligen inte är i klimakteriet.

I vissa fall syns det ingenting alls på FSH-linjen. När ingen kontroll-linje utvecklas är det inte möjligt att tolka testet. Testet ska då anses vara ogiltigt. I detta fall rekommenderas det att göra om testet med en ny FSH-CHECK-1 STRIP och ett nytt urinprov.

#### 3. Misslyckat resultat

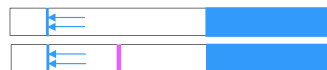

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en FSH linje så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest Klimakterietest utförs med ny urin. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte tillräcklig mängd urin har använts.

# quick test

### Frågor och svar

#### Hur fungerar Quicktest Klimakterietest?

Quicktest Klimakterietest är ett urinprov som kan upptäcka förhöjda nivåer av hormonet FSH, vilket är en tecken på klimakteriet.

#### När ska testet genomföras?

Du kan utföra testet när som helst under dagen men den första urinen på morgonen är bäst att använda för att få en högre tillförlitlighet.

#### Är det möjligt att få felaktiga resultat?

Resultaten är korrekta så länge användningsanvisningarna följs noggrant. Testet kan vara felaktigt om testremsan är fuktig innan testet genomförs. Vid oväntade eller motsägelsefulla resultat rekommenderas att konsultera gynekolog, eftersom vissa hälsoproblem kan orsaka felaktig diagnos.

#### Jag lämnade den absorberande spetsen i urinen i mer än 10 sekunder. Kan jag få ett korrekt resultat?

Ja. Några sekunder kommer inte att påverka resultatet.

#### Jag lämnade den absorberande spetsen i urinen under mindre än 5 sekunder. Kan jag få ett korrekt resultat?

Nej, eftersom provmängden kan vara otillräcklig.

#### Vad ska jag göra om resultatet är positivt?

Om resultatet är positivt med det första Quicktest Klimakterietest, ska ett nytt test utföras 5 eller 7 dagar senare. Om ett positivt resultat kvarstår, var FSH-nivån förhöjd under en period och kan därför tyda på att du är under menopausal process. Du bör kontakta din gynekolog för att bekräfta eller utesluta klimakteriet.

#### Vad ska jag göra om resultatet är negativt?

Om resultatet är negativt är FSH-nivån lägre än 25mIU / ml vilket innebär att du troligen inte är under menopausal process. Men om du känner tecken på klimakteriet, rekommenderas att du utför ett nytt test 40 till 60 dagar senare eller kontaktar din gynekolog.

#### Bör testet användas som preventivmedel?

Nej, testet har inte utformats för detta ändamål och bör därför inte användas för detta.

#### Kommer avbrytandet av mitt hormonella preventivmedel (piller) att påverka resultatet?

Om du använder ett preventivmedel och du har just avbrutit det så är det möjligt att dina cykler kan vara oregelbundna under en tid. Det kan påverka resultatet. Det rekommenderas att vänta två cykler innan du använder Quicktest Klimakterietest.

#### Jag har utfört testet och resultat visade positivt men min menstruationscykel är som vanligt, varför är det så?

Ett positivt test indikerar att FSH-nivån är lika med eller högre än 25 mIU / ml vilket innebär att du eventuellt är under menopausal behandling. Övergången är definierad som menstruationstopp under en period på 12 månader. Testresultatet kan vara positivt medan din menstruationscykel varaktighet är fortfarande som vanligt. Det innebär att du befinner dig i peri-menopausfasen