

M-Albu-Check-1 Strip

Ref. 27037 Självttest som upptäcker albumin i urin

Generellt

Albumin förekommer normalt i urinen i små mängder eller i så små mängder att det inte ens är detekterbart. En hög albuminnivå tyder på dysfunktion av njurarnas filtreringsfunktion. Koncentrationen glukos eller triglycerid (fett) och en bakomliggande diabetes eller hypertoni är faktorer som främjar urinutskiljningen av albumin.

M-Albu-Check-1 Strip-testet är ett enkelt immunokromatografiskt test för att kvalitativt bestämma albumin i urinen. På mindre än 10 minuter är det möjligt att upptäcka onormala albuminkoncentrationer i urinen.

INNEHÅLL

Förpackningen innehåller följande:

- 1 Aluminiumförpackning som innehåller 1 test och 1 torkmedel
- 1 Urinkopp
- 1 Manual

Öppna förpackningen först när du är redo att utföra testet.

NÄR SKA TESTET UTFÖRAS?

Det är rekommenderat att utföra testet med den första morgonurinen.

VIKTIG INFORMATION

1. Detta är ett in-vitro självttest, endast för externt bruk. Får ej förtäras.
2. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv.
3. Förvaras mellan +4° C till +30° C.
4. Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat med ett timglas på ytterförpackning samt aluminiumförpackning.
5. Återanvänd inte M-Albu-Check-1 Strip.
6. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur.
7. Sorteras som restavfall

GÖR SÅ HÄR

- 1 - Samla urin i medföljande urinkopp, ca 1cm till 1,5 cm.
- 2 - Riv upp skyddspåsen och ta ut testremsan från påsen. Släng torkmedlet.
- 3 - Håll testremsan vertikalt ner i behållaren med urin under 5 till 10 sekunder. Se bild till höger.

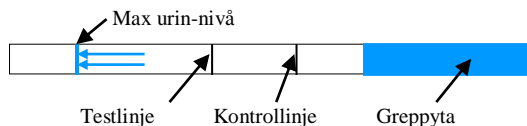


Fig. 1

- 4 - Placera testremsan plant på ett torrt underlag.
- 5 - Avläs resultatet efter 5 till 10 minuter. Tolka inte efter 15 minuter.

AVLÄS RESULTAT

För att avläsa resultatet ska du jämföra intensiteten av linjerna.




1. Positivt resultat




Resultatet är positivt om Kontroll-linjen är mörkare än testlinjen. Detta betyder att din urin innehåller mer än 20 mg/l albumin. Det är rekommenderat att ett nytt test utförs. **Om även detta är positivt – kontakta läkare.** Observera: I vissa fall visas ingen Testlinje.

2. Gränsfall

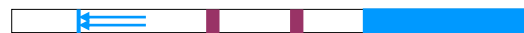


Intensiteten är jämlig mellan Test och Kontrollinje. Detta resultat indikerar att din urin innehåller mellan 10 till 20 mg/l albumin. **Det är rekommenderat att efter några dagar kontrollera albuminnivån igen.**

3. Negativt resultat

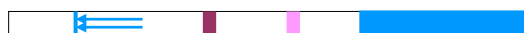

Resultatet är negativt när Testlinjens intensitet är starkare än Kontrollinjen. Detta resultat indikerar att din urin innehåller mindre än 10 mg/l albumin.

4. Misslyckat resultat

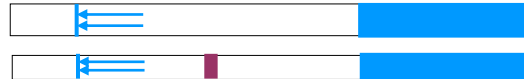

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en Testlinje så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och inte kan återanvändas.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur fungerar M-Albu-Check-1 Strip?

När njurarna fungerar normalt är albumin inte närvarande i urinen eller är endast närvarande i mycket låga koncentrationer (mindre än 10 mg/l). M-Albu-Check-1 Strip-testet detekterar onormala albuminkoncentrationer i urinen.

Jag använde inte den första morgonurinen, kommer testet vara tillförlitligt?

Koncentrationen i morgonurinen är generellt högre. Av den anledningen är morgonurin att rekommendera då det möjliggör bäst resultat. Dock kan M-Albu-Check-1 Strip användas när som helst på dagen.

Vad ska jag göra om resultatet är positivt?

Om resultatet är positivt betyder det att testet detekterat koncentrationer över 20 mg/l albumin i din urin. Detta kan vara temporärt och övergående. Repetera därför med ett nytt test efter några dagar. Om även detta test visar positivt bör du kontakta läkare.

Vad ska jag göra om resultatet är ett gränsfall?

Detta resultat betyder att testet detekterat en albuminnivå som är högre än 10 mg/l men under 20 mg/l. Detta resultat kräver ingen närmare utredning men nya tester bör göras löpande.

Jag är fysiskt aktiv, kan det påverka resultatet?

Ja, intensiv fysisk träning ökar nivåerna av albumin. För ett tillförlitligt resultat bör du därför avstå från att använda M-Albu-Check-1 Strip test.

Finns det några andra tillfällen då jag inte bör utföra testet?

Ja, om du har feber, infektion eller vid graviditet. Dessa tillstånd ökar nivån av albumin.

Behöver jag tänka på mitt vätskeintag före test?

Överdriven konsumtion av vätska kan ge ett så kallat falskt negativt resultat. Vid underkonsumtion av vätska kan ge ett falskt positivt resultat. Drick därför normalt.

Hur tillförlitligt är M-Albu-Check-1 Strip?

M-Albu-Check-1 Strip test är mycket tillförlitligt. Det används av diverse vårdinrättningar. Studier visar en tillförlitlighet på ca 88%. Även om testet anses som tillförlitligt kan falska positiva och falsk negative resultat förekomma.



Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - Cerisé
B.P. 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

	Store between +4°C and +30°C	LOT	Batch number		Expiry date
	Manufacturer				



MD- 270012 m5 c – MALBSTRI600603
Revised 2016/11

	Read the instructions before use	IVD	For <i>in vitro</i> diagnostic use		Do not reuse
--	----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--------------