

quick test

Drogtest Kokain - opiater - THC

Quicktest Drogtest är ett självtest som visar om kokain, opiater eller cannabis (THC) finns i urin. Testet mäter inte mängden av ovan preparat, det indikerar endast om droger finns i urinen.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

Förpackningen innehåller:


- 1st Drug-check IVD Drogtest
- Manual på svenska
- Torkmedel (används ej)

Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, det är endast för externt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande.

Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.
Förvaras torrt och skyddas mot solljus.

Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat på ytterförpackning samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Quicktest Drogtest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

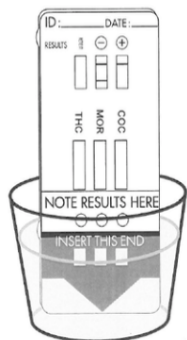

Doppa till linje i
5-10 sekunder -
avläs efter 3 till 5
minuter

quick test

Gör så här:

1. Ta ut testkassetten från aluminiumförpackningen, låt torkmedlet vara kvar.
2. Urinera i en ren behållare (t.ex. en plastmugg). Doppa testkassetten med den absorberande delen i behållaren i 5-10 sekunder.
3. Placera testet på ett plant underlag. Avläs resultat efter 3-5 minuter.
4. Tolka inte resultatet efter 8 minuter.

Avläs resultat:

1. Negativt resultat

Två färgade linjer framträder i testfönstret. Detta indikerar på att det inte finns några droger i urinen.



2. Positivt resultat

Endast **en** färgad linje framträder. Detta indikerar att det finns droger i urinen.



3. Misslyckat resultat

Om ingen linje framträder är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och inte kan återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest Drogtest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte tillräcklig mängd urin har använts. Testet kan också vara kontaminerat av smuts från bristfällig hygien av användare.

quick test

Frågor och svar

Ska jag testa på morgonen?

Testet kan användas när som helst på dagen.

Kan resultatet vara felaktigt - hur säkert är det?

Testet är 99,8% säkert. Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts.

Kan jag avläsa testet direkt?

Nej, läs testet från 3-5 minuter.

Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas från 3 till 5 minuter. Efter 15 minuter är testet inte tillförlitligt och bör kastas.

Sensitivitet:

Kokain: > 300ng/ml

Opiater: > 300ng/ml

THC: > 50ng/ml

Tillverkat av:
Manufactured by VEDALAB - France

	Read the instructions before use	IVD	For <i>in vitro</i> diagnostic use		Do not reuse
	Store between +4°C and +30°C	LOT	Batch number		Expiration date
	Manufacturer				