





## Urinveisinfeksjons Selvtest

Ref. 70021001

Selvtest som oppdager tilstedeværelsen av leukocytter, nitritter og/eller blod i urinen.

### GENERELT

Atlas Urinveisinfeksjonstest er en enkel urintest som kontrollerer leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorene brukes til å diagnostisere urinveisinfeksjon. Testen gir resultater umiddelbart og for å lese av det gjøres en sammenligning av den fullførte testen med farge-diagrammet inkludert i pakken.

**Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.**

### Innehåll:

- 2 stk Urinveisinfeksjonstest
- 1 stk Tørkemiddel (brukes ej)
- 1 stk Manual
- 1 stk Nyanseskart

### Advarselforskrifter og viktig informasjon

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsumeres. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for håndtering, blodmengde og fortykning.

Oppbevares mellom +15° C til +30° C. Må ikke fryses. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys. Skal ikke brukes etter utløpsdato merket med et timeglass på ytterforpakningen og aluminiumsforpakningen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumspakken er åpnet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. Øvrigt skal sorteres som restavfall.

## MANUAL SELVTEST URINVEISINFEKSJON

NO

quicktest.no

### Les av resultatet

NO

Leukocytter	Nitritter	Blod	Resultat
Positivt	Positivt	Positivt	Du har urinveisinfeksjon. Det er bakterier i urinen. Blod i urinen kan skyldes infeksjon. Kontakt lege umiddelbart.
		Negativt	Du har urinveisinfeksjon. Det er bakterier i urinen. Kontakt lege umiddelbart.
	Negativt	Positivt	Du har urinveisinfeksjon. Du kan ha bakterier som ikke produserer nitritt. Hvis det er blod i urinen, kan det indikere en infeksjon. Kontakt lege umiddelbart.
		Negativt	Du har urinveisinfeksjon. Du kan ha bakterier som ikke produserer nitritt. Kontakt lege umiddelbart.

### Les av resultatet

NO

Leukocytter	Nitritter	Blod	Resultat
Negativt	Positivt	Positivt	Dette resultatet er svært lite sannsynlig. Vi anbefaler at testen utføres på nytt med en ny test. Hvis de samme resultatene oppstår, har du sannsynligvis en urinveisinfeksjon fordi det er bakterier i urinen. Forekomsten av blod i urinen betyr vanligvis at det er en kraftigere infeksjon. Kontakt lege umiddelbart.
		Negativt	Dette resultatet er svært lite sannsynlig. Vi anbefaler at testen utføres på nytt med en ny test. Hvis samme resultat oppstår, har du sannsynligvis en urinveisinfeksjon fordi det er bakterier i urinen. Kontakt lege umiddelbart.
	Negativt	Positivt	Du har ikke urinveisinfeksjon. Forekomsten av blod i urinen kan være andre tilstander, f.eks. nyrestein, overdreven mosjon, prostata-, nyre- eller blodsykdommer.
		Negativt	Ingen urinveisinfeksjon.

### SLIK GJØR DU:

- Fjern teststrimmelen fra aluminiumspakken, og la tørkemidlet ligge igjen.
- Uriner i en ren beholder (f.eks. en plastkopp). Dypp den absorberende delen i beholderen i 1 sekund.
- Plasser teststrimmelen på en flat overflate og vent ca. 30-60 sekunder.
- Les resultatet ved å sammenligne fargene med det medfølgende fargekartet. Husk å holde teststrimmelen flat selv når du sammenligner med fargene på fargekartet.
- Sammenlign fargene på teststrimmelen med fargekartet. Hvis det er en fargeendring i testområdet som kun vises langs kantene av området, indikerer det at reaksjonen ikke har funnet sted. Testen er da ikke pålitelig og vi anbefaler at testen gjentas med en ny teststrimmel. Resultatet bør avleses etter 60 sekunder fra nedsenking i urin.

NO

### BEGRENSNINGER AV TESTEN:

Substanser som forårsaker unormal farge på urinen, som f.eks. noen stoffer eller medisiner, kan påvirke fargeutviklingen på teststrimlen.

### Leukocytter:

Testresultatet indikerer ikke antall leukocytter som i en mikroskopisk kontroll. Den indikerer bare om det finnes leukocytter. Høy luftfuktighet og temperatur kan gi positivt resultat. Positive resultater kan også oppstå hvis urinen kontamineres.

### Nitritter:

Uansett mengden rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er rosa prikker eller bare rosa på kantene på teststrimlen, bør testen ikke anses som positiv. Fargeutviklingen har ingen ting å gjøre med mengden bakterier i urinen. Testen viser bare om bakteriene produserer nitritter, noen ganger kan det være bakterier som ikke produserer nitritter. Derfor kan et negativt resultat ikke utelukke urinveisinfeksjon.

### Blod:

Et falskt positivt kan noen ganger skje hvis det er bakterier i urinen. Det finnes forskjellige stoffer som også kan gi et falskt positivt resultat. Hvis en kvinne tester når hun er menstruerende, er det en risiko for positivt resultat.

Uavhengig av resultatet – oppsøk alltid lege dersom du viser symptomer på urinveisinfeksjon.

NO

NO

### Du visste at vi også tilbyr selvtester innen...



#### NYHET! Multitest X6

Nå kan du teste kolesterol, laktat (melkesyre), ketonnivåer (ketose), triglyserider og blodsukker - alt i samme instrument! Hver test har sin egen unike teststrimmel, slik at du alltid får eksakte resultater.



#### CRP-Test

Vår unike og patenterte CRP-test gir deg svar på få minutter. Du gjør testen som alle andre tester; hjemme - du får svaret med en gang.



#### Levertest

Leveren er et av kroppens viktigste organer. Hvis leveren ikke føles bra, kan mange funksjoner slås ut. Ofte kommer leverproblemer snikende og mange merker ikke av de første symptomene på at noe er galt. En levertest kan avklare hvordan leveren din har det.



## Urinvejsinfeksjons Selvtest

Ref. 70021001

Selvtest, der påviser tilstedeværelsen av leukocytter, nitritter og/eller blod i urinen.

### GENERELT

Atlas Urinvejsinfeksjonstest er en enkel urintest, som kontrollerer leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorer brukes til å diagnostisere en urinvejsinfeksjon. Testen forteller resultatet med det samme og for å aflæse dette, utføres en sammenligning av den fullførte testen med fargediatrammet inkludert i pakken.

**Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.**

### Indhold:

- 2 stk Urinvejsinfeksjonstest
- 1 st Tørringsmiddel (anvendes ikke)
- 1 st Manual
- 1 st Farvekort

### Advarselforskrifter og vigtig information

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktioner for håndtering, blodmængde og fortynding.

Opbevares mellem +15° C til +30° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. Må ikke anvendes efter udløpsdato mærket med et timeglas på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke bruges, hvis aluminiumspakken har været åbnet. Selvtesten skal ikke gjenbruges. Opbevar produktet utilgjengelig for børn og dyr. Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrigt affald skal sorteres som restaffald.

## MANUAL SELVTEST URINVEJSINFEKTION

DK

quicktest.dk

### Aflæs resultatet

DK

Leukocytter	Nitritter	Blod	Resultat
Positivt	Positivt	Positivt	Du har en urinvejsinfektion. Der er bakterier i urinen. Blod i urinen kan skyldes infektion. Kontakt læge snarest.
		Negativt	Du har en urinvejsinfektion. Der er bakterier i urinen. Kontakt læge snarest.
	Negativt	Positivt	Du har en urinvejsinfektion. Du kan have bakterier, som ikke produserer nitrit. Hvis der er blod i urinen, kan det indikere en infektion. Kontakt snarest en læge.
		Negativt	Du har en urinvejsinfektion. Du kan have bakterier, som ikke produserer nitrit. Kontakt snarest en læge.

### Aflæs resultatet

DK

Leukocytter	Nitritter	Blod	Resultat
Negativt	Positivt	Positivt	Dette resultat er højest usandsynligt. Vi anbefaler, at testen udføres på ny med en ny test. Hvis samme resultater fremkommer, har du sandsynligvis en urinvejsinfektion, fordi der er bakterier i urinen. Forekomsten af blod i urinen betyder sædvanligvis, at det er en kraftig infektion.
		Negativt	Dette resultat er højest usandsynligt. Vi anbefaler, at testen udføres på ny med en ny test. Hvis de samme resultater fremkommer, har du sandsynligvis en urinvejsinfektion, fordi der er bakterier i urinen. Kontakt lægen snarest.
	Negativt	Positivt	Du har ikke en urinvejsinfektion. Forekomsten af blod i urinen kan skyldes andre tilstande, f.eks. nyresten, overdreven motion, prostata-, nyre- eller blodsygdomme.
		Negativt	Ingen urinvejsinfektion.

DK

### SÅDAN GØR DU:

- Fjern teststrimlen fra aluminiumspakken, og lad tørremidlet blive tilbage.
- Vandladning i en ren beholder (f.eks. en plastkopp). Dyp den absorberende del i beholderen i 1 sekund.
- Placer teststrimlen på en flat overflade og vent ca. 30-60 sekunder.
- Læs resultatet ved at sammenligne farverne med det medfølgende farvekort. Husk at holde teststrimlen flad, selv når du sammenligner med farverne på farvekortet.
- Sammenlign farverne på teststrimlen med farvekortet. Hvis der er en farveændring i testområdet, som kun vises langs kanten af området, indikerer det, at reaktionen ikke har fundet sted. Testen er da ikke pålidelig, og vi anbefaler, at testen gentages med en ny teststrimmel. Resultatet skal aflæses efter 60 sekunder efter nedsenkning i urin.

DK

DK

### BEGRENSNINGER AF TESTEN:

Substanser som forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. nogle stoffer eller noget medicin, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen.

### Leukocytter:

Testresultatet indikerer ikke antallet af leukocytter som ved en mikroskopisk kontrol. Den indikerer kun, hvis der findes leukocytter. Høj luftfugtighed og temperatur kan give et positivt resultat. Positive resultater kan også forekomme, hvis urinen kontamineres.

### Nitritter:

Uanset mængden af rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er rosa prikker eller kun rosa på kanterne af teststrimlen, bør testen ikke anses for positiv. Farveudviklingen har intet med mængden af bakterier i urinen at gøre. Testen viser udelukkende, om bakterierne producerer nitritter. Nogle gange kan det være bakterier, som ikke producerer nitritter. Derfor kan et negativt resultat ikke udelukke urinvejsinfektion.

### Blod:

Et falskt positivt resultat kan forekomme nogen gange, hvis der er bakterier i urinen. Der findes forskellige stoffer, som også kan give et falskt positivt resultat. Hvis en kvinde laver testen, når hun er menstruerende, er der risiko for et positivt resultat.

### Hvordan tolker man positivt og negativt?

Andre farver end dem, som indikerer et negativt resultat, skal betragtes som positivt. Sammenlign med det medfølgende fargediatram.

Uanset resultatet – søg altid læge, hvis du viser symptomer på en urinvejsinfektion.

DK

DK

### Du vidste, at vi også tilbyder selvtest inden for...



#### NYHED! Multitest X6

Nu kan du teste kolesterol, laktat (mælkesyre), ketonniveauer (ketose), triglyserider og blodsukker - alt sammen i ét instrument! Hver test har sin egen unikke teststrimmel, så du altid får præcise resultater.



#### CRP-Test

Vores unikke og patenterede CRP-test giver dig svar på få minutter. Du laver testen som enhver anden af vores tests; derhjemme - du får svaret med det samme.



#### Levertest

Leveren er et af kroppens vigtigste organer. Hvis leveren ikke har det godt, kan mange funktioner slås ud. Ofte kommer leverproblemer snigende, og mange mennesker bemærker ikke de første symptomer på, at der er noget galt. En levertest kan afklare, hvordan din lever har det.